



Your On Demand Medical Exam



# TytoCare 5.3

Інформація про версію

Січень 2022 р.

## ЗМІСТ

<b>Інформація про версію TytoCare 5.3</b>	<b>3</b>
<b>Особливості TytoCare 5.3</b>	<b>3</b>
<b>Як оновити програму TytoCare до версії 5.3</b>	<b>3</b>
<b>Зворотня сумісність</b>	<b>3</b>
<b>Нові функції для пацієнтів</b>	<b>4</b>
<b>Поліпшення в академії</b>	<b>4</b>
<b>Поліпшена навігація під час самостійного огляду</b>	<b>4</b>
<b>Вбудована/гібридна інтеграція – процес підключення пристроїв</b>	<b>5</b>
<b>Пронумеровані точки легень під час огляду легень</b>	<b>5</b>
<b>Нові функції для лікарів</b>	<b>6</b>
<b>Виберіть місцезнаходження при створенні пацієнта через програму TytoCare</b>	<b>6</b>
<b>Можливості для адміністраторів / ІТ-команд</b>	<b>7</b>
<b>Зміна порядку відвідування у програмі TytoCare</b>	<b>7</b>
<b>Приховати деактивовані облікові записи пацієнтів</b>	<b>7</b>
<b>Подивитися, які лікарі перебувають у мережі</b>	<b>7</b>
<b>Ерісінтеграція</b>	<b>8</b>
<b>Підтримка інтеграції SAML із вбудованою інтеграцією (iFrame)</b>	<b>8</b>
<b>Незначні покращення</b>	<b>8</b>
<b>Немає кнопки ОК в кімнаті очікування</b>	<b>8</b>
<b>Доданий зовнішній ідентифікатор відвідування (CSN) до звіту "Відомості про відвідання організації"</b>	<b>8</b>
<b>Зведена таблиця змін</b>	<b>9</b>

## Інформація про версію TytoCare 5.3

Примітка: наприкінці цього документа є зведена таблиця змін, в якій представлений огляд того, які зі змін версії 5.3, до якої частини платформи. за замовчуванням.

## Особливості TytoCare 5.3

**Tyto Care 5.3 представляє важливі поліпшення поточних функцій, у тому числі:**

- ❖ Поліпшення в академії Тайто
- ❖ Поліпшена навігація під час проведення самостійних оглядів
- ❖ Вибір розташування для користувачів TytoPro
- ❖ Інтерфейс користувача та виправлення помилок

## Як оновити програму TytoCare до версії 5.3

Якщо ваш мобільний пристрій налаштований на автоматичне отримання оновлень з Apple App Store або Google Play Store, нова версія програми автоматично завантажується на ваш мобільний пристрій, але вам все одно може знадобитися підтвердити оновлення або ініціюйте оновлення самостійно в програмах Apple App Store або Google Play Store виконайте пошук програми TietoCare та виберіть опцію оновити.

Щоб вручну оновити програму до нової версії, відкрийте програму App Store / Play Store на своєму мобільному пристрої.

## Зворотня сумісність

Внутрішня інфраструктура TytoCare 5.3 та кабінет лікаря TytoCare повністю сумісні з версією пристрою TytoCare 5.2.3 та версією програми 5.2.3 та вище.


Рекомендується завжди оновлювати пристрій та програму TytoCare до останньої версії.



## Функції для пацієнтів

### Поліпшення в академії


Академія, наш простий у використанні інструмент для навчання та практики, тепер стала більш доступною та простішою у використанні, надаючи користувачеві покращений користувацький досвід при вивченні того, як проводити огляди за допомогою TytoCare.

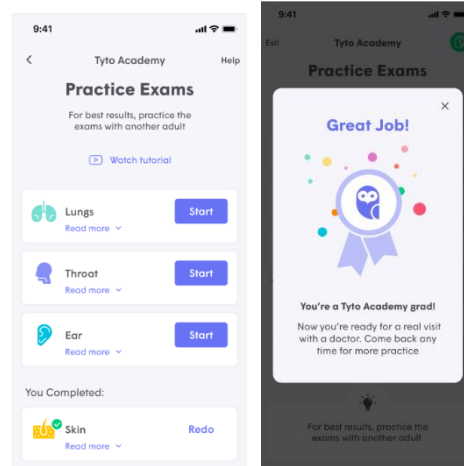

Щоб отримати необхідну інформацію більш зручно та швидко, Академія пропонує вибрану кількість ключових оглядів для практики та включає святкову анімацію після завершення кожного кроку.

### Поліпшена навігація під час самостійного огляду.

Під час самостійних оглядів користувач зможе перемикатися між оглядами інтуїтивніше з програми TytoCare.

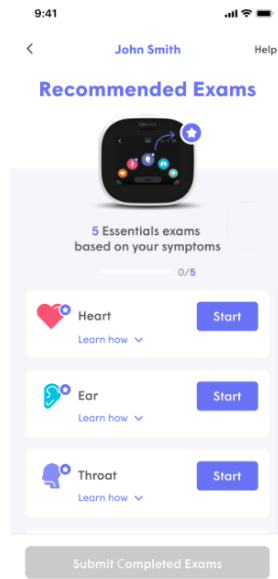

Використання опції перевірки симптомів тепер полегшало, ніж будь-коли. Користувач бачить, які огляди рекомендуються виконати на основі симптомів, введених користувачем. Після завершення перевірки симптомів користувач отримує інструкції з виконання найактуальніших обстежень для виявлених симптомів за допомогою "Ті" на одному простому екрані.

На пристрої TietoCare користувач побачить фіолетову зірочку поруч із дослідженнями, рекомендованими для аналізу заявлених симптомів. Існують також додаткові інструкції, які допоможуть успішно провести огляди – при натисканні на кнопку "Дізнатися, як" будуть показані поради та посібники, які допоможуть при кожному огляді.

## Вбудована/гібридна інтеграція – процес підключення

### пристроїв

Щоб переконаватися, що пристрій TietoCare готовий до використання перед проведенням онлайн-консультації, яка відбувається з лікарем, ми додали функцію, яка піклується про поєднання пристрою та підключення до лікаря швидше та зручніше для пацієнта.

Лікарю не потрібно заходити в різні меню, щоб переконаватися, що користувач виконує необхідні кроки для успішного проведення онлайн-консультації, і може отримати вигоду з поліпшеної взаємодії з користувачем.

Для отримання додаткової інформації проконсультуйтеся зі своїм керівником із впровадження.

### Пронумеровані точки легень під час огляду легень


Під час прослуховування легень тепер пронумеровано точки легень на пристрої TytoCare. Таким чином, якщо лікар каже пацієнтові помістити пристрій TytoCare «у другу точку», він може легко побачити, де його розмістити на грудях.

## Нові функції для лікарів

### Виберіть місце розташування під час створення пацієнта за допомогою програми TytoCare.

Коли професіонал додає пацієнта до програми TytoCare, тепер він також може вибрати місцезнаходження для цього пацієнта. Це спрощує призначення пацієнтів у певне місце, яке може бути фізичним (наприклад, клініка, школа чи інша установа) чи іншим способом групувати пацієнтів (наприклад, вік, статус страховки тощо).

Розташування також можна використовувати для підвищення конфіденційності, надаючи лікарям доступ тільки до пацієнтів, які знаходяться в одному місці (наприклад, в одній клініці).

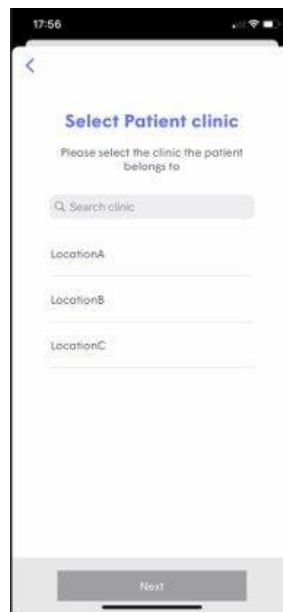


Також можна дати місце розташування ім'я та опис, щоб зробити його більш значущим. Наприклад, адміністратор може захотіти назвати місце «Клініка».



## Можливості для адміністраторів / ІТ-КОМАНД

### Зміна порядку відвідування у програмі TytoCare

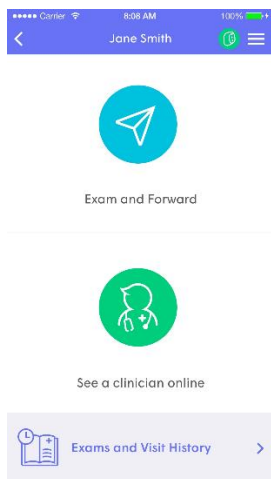

З'явився новий параметр, який дозволяє контролювати порядок, в якому відображаються варіанти відвідування, коли пацієнту потрібно вибрати, як підключитися до лікаря для проведення огляду. Наприклад, ви можете захотіти, щоб в якості основного варіанта був обраний варіант «Відвідування лікаря онлайн», а не «Самостійний огляд».


Цей порядок може вплинути на те, якому варіанту пацієнти надають перевагу в першу чергу.

### Приховати деактивовані облікові записи пацієнтів

Тепер адміністратор може приховати деактивованих пацієнтів на порталі адміністратора. Це корисно в ситуаціях, коли ви не хочете видаляти деактивованих пацієнтів, тому що вам може знадобитися повторно активувати їх у майбутньому. Але оскільки багато деактивованих пацієнтів можуть захарашувати екран, вам може бути зручніше приховати їх з поля зору.

### Подивитися, які лікарі перебувають у мережі

При переназначенні лікаря на порталі адміністратора легко дізнатися, чи лікар у мережі і чи доступний він для відвідування, наберіть символ % у полі пошуку. Відображається список лікарів, включаючи статус кожного з них.

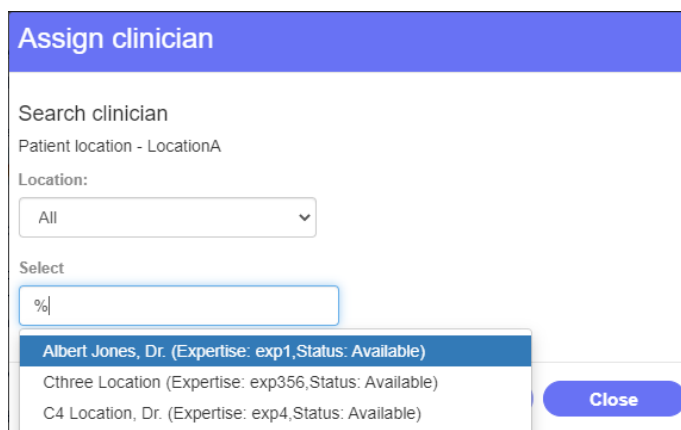

### Еріс інтеграція

У нашій інтеграції з Еріс було внесено декілька покращень.

Цей документ та його зміст є власністю та конфіденційними.

- Пацієнти можуть запустити самостійний огляд, тоді як TietoCare автоматично створює запис на прийом до Еріс.
- Коли життєво важливі показники фіксуються під час онлайн-консультації, лікар може переглядати їх у блок-схемі Еріс, коли візит переноситься та пацієнт повертається до кімнати очікування (тобто до закінчення візиту).
- Тепер пацієнти можуть виконувати самостійне обстеження без надання CSN (ідентифікатора відвідин). Цей ідентифікатор створюється для них автоматично.
- Коли пацієнт скасовує онлайн-візит TytoCare, він отримує вказівку відмінити його в MyChart.

## Підтримка інтеграції SAML із вбудованою інтеграцією (iFrame)

Тепер можна автентифікувати лікаря за допомогою SAML у вбудованому iFrame.

## Незначні покращення

### Немає кнопки ОК в кімнаті очікування

У програмі Web POC, коли пацієнта відправляють з відвідування кімнату очікування, йому більше не потрібно натискати кнопку ОК. Це дозволяє уникнути потенційних проблем, які можуть виникнути, якщо пацієнт не натисне кнопку.

### Доданий зовнішній ідентифікатор відвідування (CSN) до звіту "Відомості про відвідання організації"

Для клієнтів з інтеграцією, яка використовує поле "Зовнішній ідентифікатор", у звіті "Відомості про відвідування організації" з'явилося нове поле: CSN, що містить інформацію про зовнішній ідентифікатор.



## Зведена таблиця змін

Особливість	Має відношення до:	Поліпшення поточної функції
Поліпшення в академії	Академія	✓
Поліпшена навігація під час самостійного обстеження.	Загальний	✓
Вбудована/гібридна інтеграція – процес підключення пристроїв	Загальний	✓
Пронумеровані точки легень під час огляду легень	Загальний	✓
Виберіть місце розташування під час створення пацієнта за допомогою програми TietoCare.	ЦіPro	✓
Зміна порядку відвідування у програмі TytoCare	Загальний	
Приховати деактивовані облікові записи пацієнтів	IT/ Admin	✓
Подивитися, які лікарі онлайн	IT/ Admin	✓
Ерісінтеграція	IT/ Admin	✓
Підтримка інтеграції SAML із вбудованою інтеграцією (iFrame)	IT/ Admin	✓
Немає кнопки ОК в кімнаті очікування	ЦіPro	✓
Додати зовнішній ідентифікатор відвідування (CSN) до звіту про подробиці відвідування організації	IT/ Admin	✓